

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Algunas sugerencias en caso de que se encuentre con alguno de estos problemas...

Si usted no puede hacer que el pecho se levante cuando sopla...

Asegúrese de que:

- La cabeza está inclinada hacia atrás.
- Los orificios de la nariz están cubiertos.
- La bolsa pulmonar está debidamente colocada: Que no esté retorcida... que esté extendida dentro de la cavidad del pecho.
- La bolsa pulmonar está debidamente conectada a la cabeza.
- La bolsa está sostenida contra la tapa del cuello.
- La bolsa no ha sido dañada durante el ensamblaje.
- La tapa para el cuello está en la posición correcta ("FRONT" en la tapa para el cuello debe estar alineado con el frente de la cabeza).

Si usted no escucha "clic" cuando comprime el pecho de un modelo Adulto/Niño:


- Asegúrese de que está poniendo suficiente presión (usted debería escuchar un "clic" cuando comprime la espuma aislante a casi un tercio de su profundidad).
- Revise el Pistón de Compresión Ajustable del Pecho y asegúrese de que la aguja del Seleccionador de Edad está indicando completamente a Adulto o a Niño - dependiendo de la edad que usted esté aprendiendo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

TAPA PARA EL CUELLO

Antes de limpiar las cabezas, quite la tapa para el cuello

- Para quitar la tapa del cuello, enrosque la tapa en la dirección de las agujas del reloj, como en la tapa de un frasco (un cuarto de vuelta).

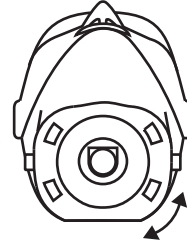

CABEZAS

- La cabeza se puede limpiar de las siguientes maneras:
- Póngala en una máquina lavaplatos, O...
- Lave la cabeza con agua y jabón. Luego, por 10 minutos, remójela en una solución de ¼ de cloro con un galón de agua, O...
- Desinfecte con una toallita con alcohol.
- Después de limpiar la cabeza, cambie la tapa para el cuello enroscándola otra vez en la cabeza. Asegúrese de que "FRONT" en la tapa para el cuello está alineada con el frente de la cabeza.

CUERPOS

- Los cuerpos se pueden limpiar sin problema con una solución de agua/cloro (ver detalles bajo la sección "CABEZAS"), alcohol, o cualquier otro agente desinfectante.*

* Los cuerpos de los modelos están hechos a base de una espuma aislante y no son a prueba de agua. Estos no se deben sumergir en agua.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

(FOLLETO DE USO Y CUIDADO)

MODELO PARA ENTRENAMIENTO


PARA COMENZAR...

- Use este folleto de instrucción para saber cómo ensamblar sus modelos.
- Limpie la cabeza del modelo antes de comenzar (vea las instrucciones de limpieza al final de este folleto.)
- Si usted tiene algún problema con el ensamblaje de estos modelos, vea la guía que le ayudará a resolver su problema y que se encuentra al final de este folleto (o llámenos sin costo alguno al 1-800-558-9595).


CONTENIDOS Y PARTES

Cada modelo viene con un suministro de mascarillas, bolsas pulmonares y un instrumento de inserción.

MODELO ADULTO/NIÑO

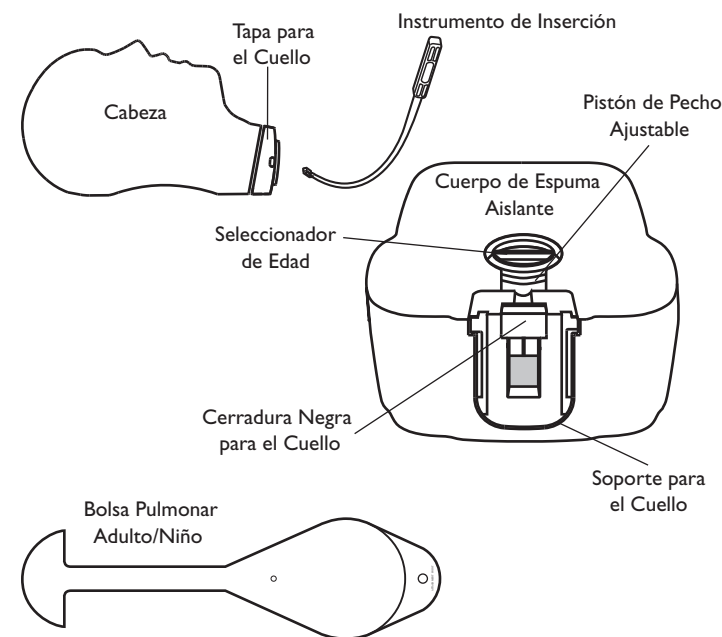

MODELO INFANTIL

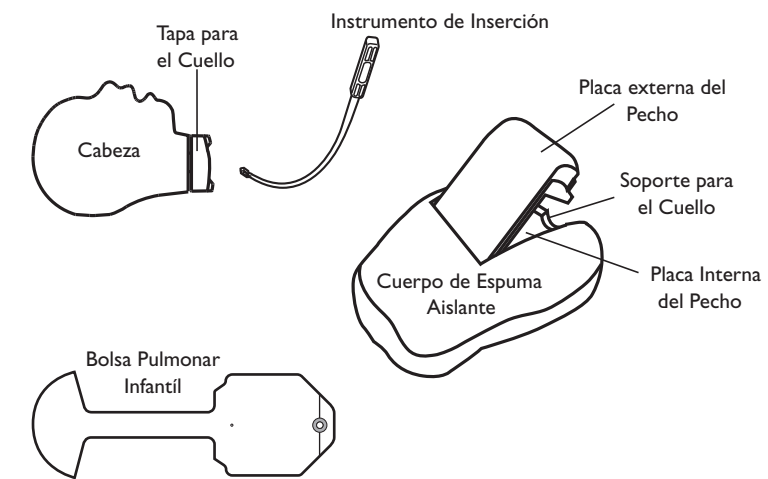

CONSEJO:

Antes de instalar la Bolsa Pulmonar- Arrugue el cuello y parte de la bolsa enrollándola entre los dedos. Esto asegurará que el aire circule libremente a la bolsa pulmonar durante su uso.

CPR
P R O M P T

GRACIAS POR INVERTIR EN PRODUCTOS PROFESIONALES DE CPR PROMPT PARA ENTRENAMIENTO.


Favor llámenos SIN COSTO ALGUNO al 1-800-558-9595

E-mail a: lifeform@eNASCO.com • Página de Internet: www.eNASCO.com


O Escriba a: NASCO • Attn: CPR Prompt® • 901 Janesville Ave. • Fort Atkinson, WI 53538-0901

ENSAMBLAJE ADULTO/NIÑO


- 1** • Introduzca el instrumento de inserción a través del cuello, hacia arriba, hasta que el gancho se extienda fuera de la boca.

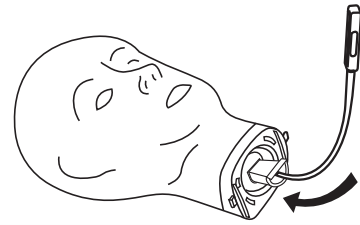


- 2** • Ponga la bolsa en la cara del modelo.
• Conecte el gancho del instrumento al hueco en la parte baja de la bolsa.

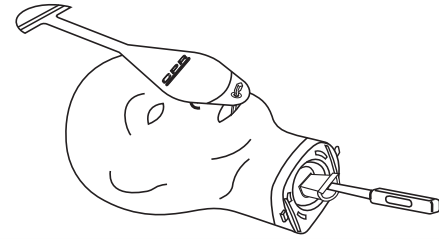


- 3** • Extienda, cuidadosamente, el instrumento de inserción hasta que la bolsa se extienda fuera de la apertura en el cuello.
• Parte de la máscara debe cubrir la boca.

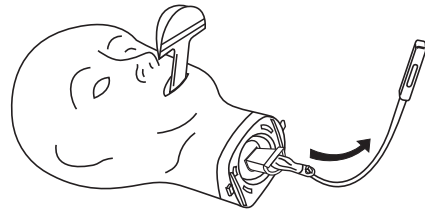


- 4** • Quite la cinta adhesiva y doble las lengüetas sobre la boca.
• Conecte la cabeza con el torso.

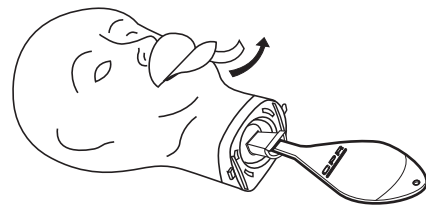


- 5** • Saque el pistón fuera de la parte baja de la cavidad del pecho.

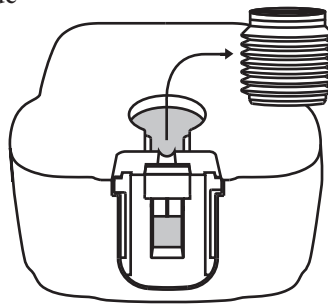


- 6** • Quite la cerradura negra en el soporte para el cuello.
• Apriete la parte de arriba de la cerradura negra, levántela y sáquela del soporte para el cuello.

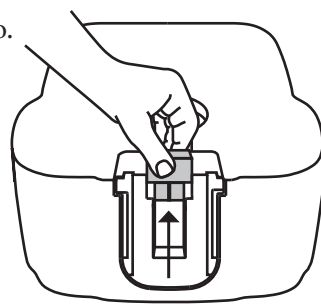


- 7** • Mientras sostenga la cabeza, pase la bolsa pulmonar a través de la abertura en el soporte para el cuello y extienda la bolsa al centro de la cavidad del pecho.

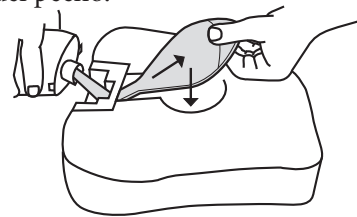

- 8** • Con la cabeza hacia abajo, alinee los dos alfileres en la cabeza con las 2 aberturas en el soporte para el cuello.
• Empuje los alfileres hasta que se deslicen en las aberturas y la cabeza quede en su lugar.


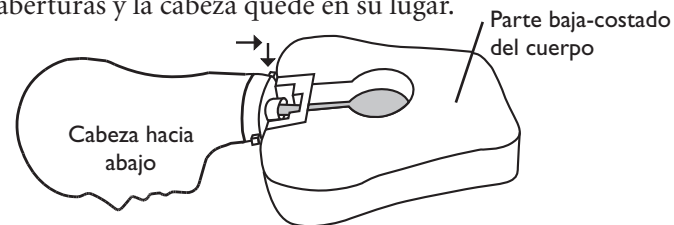


- 9** • Cambie la cerradura negra en el soporte del cuello para sujetar la cabeza en su lugar.

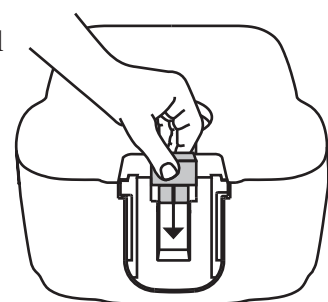

Asegúrese de que no haya problemas con la bolsa pulmonar.

- 10** a) Gire el selector de edad en el pistón del pecho para que el alfiler esté junto a la flecha de Adulto o Niño (dependiendo de cual sea la edad que esté aprendiendo).
b) Cambie el pistón en la cavidad del pecho para que el selector de edad sea visible en el cuerpo.

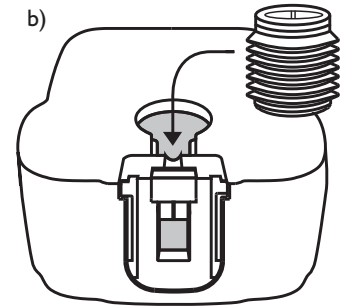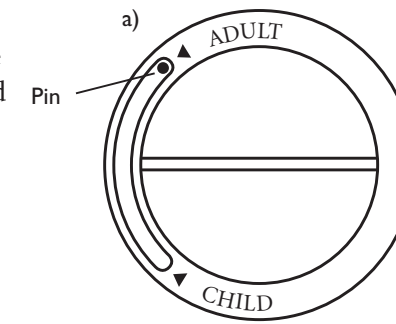


ENSAMBLAJE INFANTIL


- 1** • Introduzca el instrumento de inserción a través del cuello hacia arriba hasta que el gancho se extienda fuera de la boca.




- 2** • Ponga la bolsa en la cara del modelo. Conecte el gancho del instrumento al hueco en la parte baja de la bolsa.

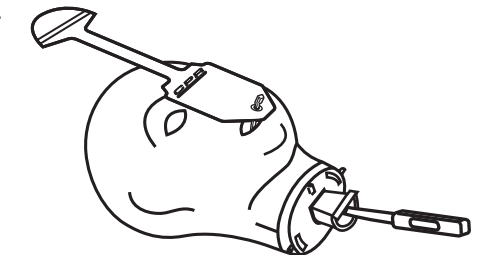


- 3** • Extienda, cuidadosamente, el instrumento de inserción hasta que la bolsa se extienda fuera de la apertura en el cuello. Parte de la máscara debe cubrir la boca.

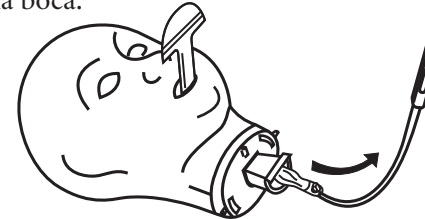


- 4** • Quite la cinta adhesiva y doble las lengüetas sobre la boca. Conecte la cabeza con el torso.

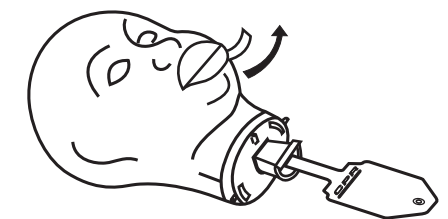

- 5** • Abra el pecho del infante.
• Agarre el cuello de la placa exterior del pecho y levántelo.

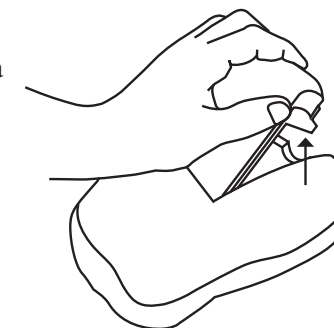

- 6** • Deslice la cabeza y la bolsa pulmonar dentro del soporte para el cuello.
• Con la cabeza hacia abajo, alinee los dos alfileres en la cabeza con las 2 aberturas en el soporte para el cuello.
• Empuje los alfileres en las aberturas y deje bajar la cabeza.

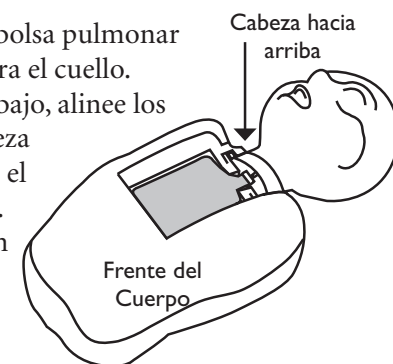

- 7** • Centre la bolsa pulmonar sobre la placa interna del pecho.
• Asegúrese de que la bolsa está extendida, y que no existan "problemas".



- 8** • Cambie la placa externa del pecho.

