Chito**SAM**®100



APÓSITO HEMOSTÁTICO 100 % CHITOSÁN

EXCLUSIVAMENTE PARA USO TEMPORAL EXTERNO

Para el control de hemorragias moderadas a profusas, así como de abrasiones y laceraciones externas.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Utilice una cantidad suficiente de apósitos del tamaño adecuado en función de la zona y el grado de hemorragia.
- 2. Aplique el apósito directamente sobre la herida.
- 3. Para controlar la hemorragia, presione con fuerza durante 3 minutos. Fije el apósito con un vendaje de cobertura adecuado, manteniendo la presión sobre la herida.

PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA:

No colocar sobre los ojos. Contiene chitosán procedente de crustáceos. Use solución salina o agua estéril para limpiar los restos del apósito al retirarlo de la herida.

ADVERTENCIA:

Si se teme algún tipo de reacción por alergia a los crustáceos, consulte con su médico.

El apósito debe retirarse antes del transcurso de 24 horas.

- No está fabricado con látex de caucho natural
- No reesterilizar
- No reutilizar
- No usar el producto si el envase está abierto o dañado

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Fabricante	
Código de lote	LОТ
Referencia en catálogo	REF
No reutilizar	2
No usar el producto si el envase está dañado	®
No reesterilizar	min min man
No está fabricado con látex de caucho natural	M
Rango de temperatura	15°C 1 35°C
Esterilizado por irradiación	STERILE R
Fecha de caducidad	琞
Mantener seco	*
Representante autorizado en la Unión Europea	EC REP
Producto sanitario	MD
Mantener alejado de la luz solar	漆
Marcado CE	CE
Importador	(1)

CT101-A-EN / 10 cm x 10 cm (4 in x 4 in) | Apósito hemostático de una sola capa

CT101-B-EN / 7,6 cm x 1,22 m (3 in x 4 ft) | Apósito hemostático con pliegue en Z

CT101-C-EN / 7,6 cm x 1,83 m (3 in x 6 ft) | Apósito hemostático con pliegue en Z

FABRICADO EN TAIWÁN

REF

REF





Obelis S.A, Bd. Général Wahis, 53, 1030 Bruselas (Bélgica)

Distribuido por: SAM Medical Products® 12200 SW Tualatin Rd, Ste 200 Tualatin, OR 97062 (EE. UU.) +1 503.639.5474

sammedical.com