

FÉRULA INFLABLE JUEGO 6 PIEZAS

PROeMer
Productos de Emergencia

Cod: A406D



DESCRIPCIÓN

Las férulas inflables están diseñadas para fracturas, extremidades rotas, aplastadas, esguinces o quemadas, ayuda a prevenir mayores daños a los tejidos blandos. Son fáciles de usar, se infla en segundos.

Métodos de uso:

Este paquete incluye seis férulas y una bomba. Elija las férulas inflables adecuadas para diferentes condiciones.

1. Abra las férulas y simplemente envuélvalas alrededor de la extremidad lesionada y luego cierre la cremallera.
2. Abra la tapa que viene en la férula e infle con el bombín.
3. Pellizca la base de la tapa (pitufo) para desinflarla.
4. Abra la cremallera y quítese la férula.

CARACTERÍSTICAS

1. La aplicación es más rápida, sencilla y cómoda que las tecnologías convencionales de vendaje/ferulización.
2. Ayuda a prevenir mayores daños a los tejidos blandos, combate el shock y alivia el dolor.
3. Aplica una presión uniforme sobre el brazo o la pierna lesionados; proporciona un soporte rígido y permite la libre circulación.
4. Inmoviliza, amortigua y protege las extremidades lesionadas para que los pacientes puedan ser transportados de forma segura y sencilla.
5. Completamente lavable y reutilizable: se puede esterilizar con gas o marinar (para evitar infecciones cruzadas)
6. No es necesario retirar la férula transparente de la radiografía.

ESPECIFICACIÓN DE TAMAÑO:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Mano y muñeca: 38 cms. | 2. Medio brazo: 63.5 cms. |
| 3. Brazo completo: 81 cms. | 4. Pie y tobillo: 38 cms. |
| 5. Media pierna: 63.5 cms. | 6. Pierna completa: 81 cms. |

Nota:

1. Las férulas infladas con aire pueden tener fugas. Cuando se aplica en climas fríos, una férula inflable se expandirá cuando el paciente se traslade a un lugar cálido.
2. También se producen variaciones de presión si se traslada al paciente a una altitud diferente.
3. Controle frecuentemente la presión en la férula con la yema del dedo.
4. Evite que la capa superficial se pinche con el objeto afilado.

*Imágenes referenciales

www.proemer.cl

ventas@proemer.cl / contacto@proemer.cl / f.moreno@proemer.cl / a.aravena@proemer.cl