

¿Sin venas?... Piense en **BiG**



Acceso
INTRAÓSEO
en unos pocos
SEGUNDOS


BiG
SIMPLY SAVING LIVES

Adulto Bone Injection Gun

- Aguja trocar desechable a resorte automático.
- Rapido aprendizaje de uso.
- Segura, confiable y apta para uso en condiciones extremas.
- Lista para usar, no requiere mantenimiento.
- Tamaño de bolsillo, 16,5 x 7,6 cm.
- Liviana (menos de 80 g).
- 5 años de vida útil.
- Aprobada por la FDA y CE.



**Cualquier paciente,
Cualquier momento,
Cualquier lugar**

El primer dispositivo intraóseo (IO) automático fácil de usar del mundo le brinda acceso IO seguro y rápido para la inserción de fluidos y medicamentos en flujos similares a la infusión IV periférica.

Con la ayuda de Bone Injection Gun™, la infusión IO puede realizarse en pocos segundos. La pistola para inyección intraósea (B.I.G) presenta un mecanismo de "posición y presión" fácil y seguro.

Comúnmente usado para el pilón tibial superior, B.I.G. se está convirtiendo rápidamente en el dispositivo elegido por médicos y paramédicos en servicios médicos de emergencia, hospitales, ejércitos, organismos gubernamentales y ambientes tácticos. B.I.G. está aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y por CE.

Adulto Bone Injection Gun - parte# BIG-A nsn# 6515-01-518-8487



ADULTO BONE INJECTION GUN

INFUSIÓN INTRAÓSEA

Azul, 15G Aguja



Cómo ubicar el sitio de penetración:




Diseño de la aguja y del resorte

A. Antes de disparar el dispositivo B.I.G. para adultos, el resorte se enrosca a presión y es contenido por un pestillo de seguridad rojo para evitar fallas.



B. Después de que se retira el pestillo de seguridad rojo y se dispara el dispositivo B.I.G. a presión directa, el resorte se libera e impulsa la aguja.

Nota: El orificio de salida en el extremo del tubo está "descentrado" con fines de seguridad.

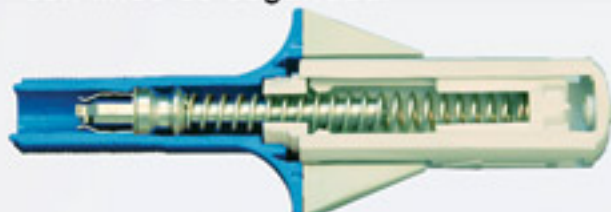

Instrucciones para uso:

1. Sostenga el extremo inferior firmemente, a 90° del hueso.



2. Apriete y tire del pestillo de seguridad rojo.



3. Mientras sostiene la parte inferior firmemente, presione hacia abajo con la palma de la mano.



4. Retire la pistola B.I.G. tirando hacia arriba con un movimiento suave de lado a lado.



5. Sujete y asegure la aguja usando el pestillo de seguridad rojo y esparadrapo.



6. Retire la aguja trocar (estilete).



7. Conecte un set de extensión para una aplicación IV estándar.



8. Confirme la colocación de la aguja aspirando y dando fluids.

