

¿Sin venas?... Piense en **BiG**



Para  
uso  
**Pediatrico** 

## Pediatrico Bone Injection Gun

- Aguja trocar desechable a resorte automático.
- "Ajuste por edad": establece automáticamente la profundidad de la aguja.
- Rapido aprendizaje de uso.
- Segura, confiable y apta para uso en condiciones extremas.
- Tamaño de bolsilo, 16,5 x 7,6 cm.
- Liviana (menos de 80 g).
- 5 años de vida útil.
- Aprobada por la FDA y CE.

La pistola Pediatric Bone Injection Gun™ es el primer dispositivo automático intraóseo diseñado específicamente para uso pediátrico. Tanto en establecimientos de Servicios Médicos de Emergencia (EMS), como en hospitales, el tiempo necesario para establecer el acceso IO puede ser el elemento crítico para salvar una vida. Cuando se usa la pistola B.I.G. pediátrica, los cuidadores establecen la profundidad de la aguja de acuerdo con la edad del paciente, y la infusión IO puede realizarse en segundos.

La American Heart Association recomienda la infusión intraósea en pacientes menores de 6 años que han tenido intentos de acceso IV fallidos o en quienes no puede establecerse el acceso IV en el término de 2 minutos mediante métodos tradicionales.

La pistola para inyección intraósea (B.I.G.) ofrece una solución simple y económica para el acceso intraóseo que permite a los cuidadores salvar vidas.



# BiG

SIMPLY SAVING LIVES



Acceso  
INTRAÓSEO  
en unos pocos  
**SEGUNDOS**



Pediatrico Bone Injection Gun  
parte# BIG-P  
nsn# 6515-01-518-8497

# BIG

SIMPLY SAVING LIVES


## PEDIATRICO BONE INJECTION GUN

INFUSIÓN INTRAÓSEA

Rojo, 18G Aguja



### Cómo ubicar el sitio de penetración

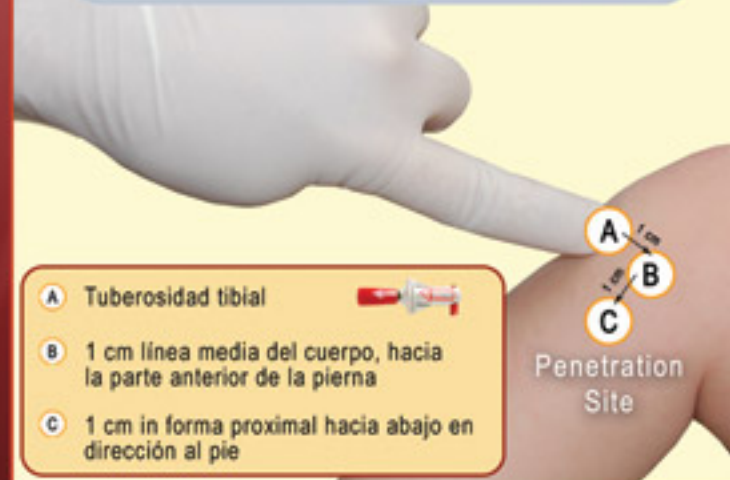


### Diseño de la aguja y del resorte

A. Antes de disparar el dispositivo B.I.G. para pediátricos, el resorte se enrosca a presión y es contenido por un pestillo de seguridad rojo para evitar fallas.



B. Después de que se retira el pestillo de seguridad rojo y se dispara el dispositivo B.I.G. a presión directa, el resorte se libera e impulsa la aguja.

**Nota:** El orificio de salida en el extremo del tubo está "descentrado" con fines de seguridad.

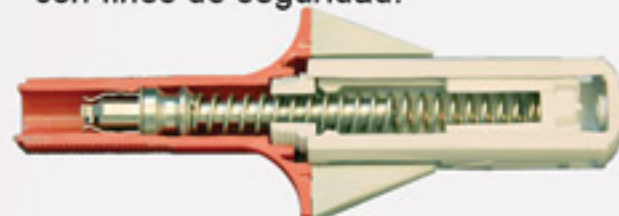

### Instrucciones para uso:

1 Elija la profundidad deseada de la aguja de acuerdo con la edad del paciente.



2 Sostenga el extremo inferior firmemente, a 90° del hueso.



3 Apriete y tire del pestillo de seguridad rojo.



4 Mientras sostiene la parte inferior firmemente, presione hacia abajo con la palma de la mano.



5 Retire la pistola B.I.G. tirando hacia arriba con un movimiento suave de lado a lado.



6 Sujete y asegure la aguja usando el pestillo de seguridad rojo y esparadrapo.



7 Retire la aguja trocar (estilete).



8 Conecte un set de extensión para una aplicación IV estándar.



9 Confirme la colocación de la aguja aspirando y dando fluidos.



**PERSYS MEDICAL**

www.ps-med.com | info@ps-med.com

Telephone: 713-723-6000

Toll Free: 1-888-737-7978

5310 Elm Street Houston, Texas 77081