

COMPRESA NO TEJIDA ESTÉRIL

PROeMer
Productos de Emergencia

Cod: 6250034D (5x5) / 6250034D (7,5 x 7,5) / 6250035D (10x10)



imagenes referenciales

MODO DE USO:

- Verifique indemnidad y vigencia del empaque.
- Tome del extremo superior e identifique hojas de apertura.
- Realice separación suave de ambas hojas paralelamente.
- Retire la gasa no tejida con técnica aséptica y/o estéril según el procedimiento a realizar.
- Ubique la gasa no tejida sobre la lesión y/o piel indemne.
- Fije con sistema adhesivo a elección.

DESCRIPCIÓN

Gasa estéril, de tejido no tejido, diseñada para cubrir, proteger y aislar la piel, puede utilizarse directamente sobre la piel lesionada del paciente. Se caracteriza por una baja adherencia a la herida una buena capacidad de absorción, de fluidos corporales, en un corto periodo de tiempo.

Indicaciones de uso: Material de uso clínico para manejo de heridas, protección de la piel indemne y en variados procedimientos clínicos:

- Heridas con exudado escaso a moderado.
- Heridas con 100% tejido de granulación.

CARACTERÍSTICAS

- Absorbente y transpirable.
- Gasa suave al tacto y fácil de manipular.
- Libre de tóxicos y de adhesivos.
- Posee escaso desprendimiento de pelusas.
- Bien tolerada por el paciente.
- Presentación Sobre estéril con 2 unidades.
- Esterilizada en Oxido de etileno.
- Caducidad 3 años.
- Medidas disponibles (cm): 5x5 / 7,5x7,5 / 10x10

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar limpio y seco.
- Temperatura menor a 25°C.
- Producto desechable de uso único.
- No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado.

www.proemer.cl

ventas@proemer.cl / online@proemer.cl / +56 2 2706 0838 / +56 2 2706 0840 / +56 2 3340 1808